



**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
САЛФЕТКИ ВЛАЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
(ТУ ВУ 100917107.077-2010)**

***(пропиточный состав – лекарственное средство – Септоцид-синерджи -
№ регистрационного удостоверения 11/09/838)***

2013 г.

Аннотация: инструкция предназначена для руководителей и персонала организаций здравоохранения, службы медицины катастроф, скорой медицинской помощи, переливания крови, стоматологических кабинетов и поликлиник, детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений социального обеспечения (дома престарелых, инвалидов и пр.), косметических салонов и парикмахерских, для взрослого населения.

1. Общие сведения

1.1. Салфетка влажная медицинская (далее СВМ) представляет собой готовое к применению изделие однократного использования из нетканого материала белого цвета размером 60×90; 115×110; 135×175 (± 2)мм, сфальцована в два слоя и упакована в герметичный пакет.

Пропиточный состав для салфеток - препарат «Септоцид-синерджи» (№ регистрационного удостоверения 11/09/838), собственного производства (ЗАО «БелАсептика»). В состав входит спирт этиловый высшей очистки 96%об, полигексаметиленбигуанид гидрохлорид, ланолина этоксилат, диэтилфталат, отдушка лимонная, вода очищенная.

1.2. Средняя масса пропиточного состава в одной СВМ – $1,7 \pm 0,2$ мл (1,30 – 1,64г); $5,0 \pm 0,5$ мл (3,78 – 4,87г); $4,5 \pm 0,5$ мл (3,46 – 4,56г), в зависимости от размера и назначения.

1.3. Срок годности СВМ – 3 года со дня изготовления.

1.4. Пропиточный состав обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий, вирусов, дрожжеподобных грибов рода Кандида.

1.5. Пропиточный состав СВМ по параметрам острой токсичности относится к 4 классу малоопасных веществ при нанесении на кожу, местно-раздражающие, кожно-резорбтивные и сенсибилизирующие свойства в рекомендованных режимах применения не выражены.

1.6. СВМ предназначена для обработки кожи пациентов в домашних условиях, в машинах скорой медицинской помощи, при чрезвычайных ситуациях, в службе медицины катастроф, детских дошкольных и школьных учреждениях, в учреждениях социального обеспечения (дома престарелых, инвалидов и пр.), в косметических салонах и парикмахерских; для обработки кожи локтевых сгибов доноров на станциях переливания крови и др. при проведении медицинских манипуляций (инъекции, обработка операционного поля, катетеризация кровеносных сосудов, пункции и др.).

1.7. СВМ может быть использована для удаления биоматериалов (кровь, слизь, гной, слюна, и т.д.) с кожи рук персонала или кожи пациентов.

1.8. СВМ может быть использована для гигиенической обработки рук, обеззараживания перчаток, одетых на руки персонала.

2. Применение

2.1. *Обработка кожи локтевых сгибов доноров:* вскрыть пакет, быстро извлечь и развернуть салфетку; тщательно, до полного увлажнения, обработать кожу локтевых сгибов, используя отдельные салфетки. Экспозиция после окончания обработки – до полного испарения пропиточного состава, но не менее 2-х минут.

2.2. *Обработка кожи инъекционного поля:* вскрыть пакет, быстро извлечь и развернуть салфетку; тщательно, до полного увлажнения, обработать кожу инъекционного

поля. Экспозиция после окончания обработки – до полного испарения пропиточного состава, но не менее 1-ой минуты.

- 2.3. *Обработка операционного поля:* вскрыть пакет, быстро извлечь и развернуть салфетку; тщательно, до полного увлажнения, обработать кожу операционного поля. Экспозиция после окончания обработки – до полного испарения пропиточного состава, но не менее 2-х минут.
- 2.4. *Удаление биоматериалов:* вскрыть пакет, быстро извлечь и развернуть салфетку, локализовать салфеткой биоматериалы, при необходимости использовать несколько салфеток – обрабатывать до полного отсутствия видимых загрязнений.
- 2.5. *Гигиеническая обработка рук:* вскрыть пакет, быстро достать и развернуть салфетку, протереть руки, обращая внимание на тщательность обработки кожи межпальцевых пространств и кончиков пальцев. Время обработки – не менее 30сек.
- 2.6. *Обработка перчаток, одетых на руки:* вскрыть пакет, быстро извлечь и развернуть салфетку, тщательно, не допуская высыхания, протирать перчатки, в течение 30 сек.

3. Меры предосторожности и первой помощи

- 3.1. СВМ используют только по назначению для наружного применения!
- 3.2. Не обрабатывать салфетками раны и слизистые оболочки
- 3.3. Огнеопасно! Не допускать контакта с открытым пламенем или включенными нагревательными приборами.
- 3.4. По истечении срока годности использование СВМ запрещается.
- 3.5. При появлении на коже раздражения, сыпи прекратить применение СВМ. Руки вымыть водой с мылом.

4. Упаковка, транспортировка и условия хранения

- 4.1. СВМ в индивидуальной упаковке упаковывают в групповую тару – картонную коробку или полиэтиленовый пакет. Размер групповой тары определяется количеством СВМ.
- 4.2. СВМ транспортируют в оригинальной упаковке производителя любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта и гарантирующими сохранность СВМ и тары.
- 4.3. Хранение осуществляют в отапливаемых помещениях при температуре от +5 до +25⁰С при относительной влажности не более 80%.

5. Методы контроля

- 5.1. Проверку упаковки и маркировки проводят визуально внешним осмотром и сличением с настоящими ТУ.
- 5.2. Внешний вид и цвет СВМ определяют визуальным просмотром.
- 5.3. Наличие сухих мест определяют визуальным просмотром.
- 5.4. Проверку целостности упаковки проводят визуально.
- 5.5. Проверку герметичности упаковки проводят погружением ее в воду на глубину 300 мм. После сдавливания упаковки руками, из пакета не должно быть выделения пузырьков воздуха.
- 5.6. Определение массы пропиточного состава.
 - 5.6.1. Оборудование:

- весы электронные Adventurer PRO AV 264C, класс точности специальный;
- весы электронные Adventurer AR 2140, класс точности 2;
- дозатор пипеточный Biohit;
- гигрометр психрометрический ВИТ-1;
- шкаф сушильный SNOL-58/350;
- ножницы;
- пинцет.

5.6.2. Проведение испытаний.

Взвешивают 5 салфеток со своими пакетами с точностью до 2-го десятичного знака, после чего пакеты надрезают по краю. Из них достают салфетки и высушивают каждую со своим пакетом. Высушивание можно ускорить, используя слабый обогрев (в сушильном шкафу при температуре 30° С в течение часа), затем пакеты с салфетками досушиваются на воздухе, до тех пор, пока полученная масса не будет отличаться от предыдущей не более чем 0,001 г. По разности масс невскрытой упаковки и ее же после вскрытия и удаления пропиточного состава определяют массу пропиточного состава.

5.6.3. Обработка результатов:

Массу пропитывающего состава (X) в г вычисляют по формуле:

$$X = \frac{(m_1 - m_0)}{5}, \quad (1)$$

- где: m_1 - масса невскрытой упаковки с салфеткой, г;
 m_0 - масса вскрытой упаковки после удаления пропиточного состава, г;
5 - количество проверенных салфеток, шт.

5.7. Проверку по органолептическим и физико-химическим показателям проводят методами, указанными в инструкции по гигиенической оценке изделий медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применяемых для их изготовления.

5.8. Проверку массы транспортной тары проводят взвешиванием на весах для статического взвешивания с допускаемой погрешностью измерения не более ± 100 г.