

# АКВА МАРИС®



**ИНСТРУКЦИЯ**  
по применению  
спрей назальный «АКВА МАРИС® ЭКТОИН»

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ:** РЗН 2014/1548 от 15.04.2016 г.

#### **СОСТАВ НА 100 МЛ:**

Эктоин – 2 г, морская соль – 0,9 г, вода очищенная до 100 мл.

Не содержит консервантов.

#### **ВНЕШНИЙ ВИД**

Прозрачный, бесцветный, лишенный запаха раствор, не содержащий видимых частиц.

**МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ДОЗ** – 142 во флаконе.

#### **НАЗНАЧЕНИЕ:**

Спрей назальный Аква Марис® Эктоин - это полностью натуральное средство, которое создает физическое препятствие («барьер») для прикрепления аллергенов к слизистой оболочке носа. Аква Марис® Эктоин защищает от развития аллергии, препятствует развитию аллергического ринита и способствует восстановлению слизистой оболочки носа, поврежденной под воздействием аллергенов.

#### **ОПИСАНИЕ:**

Спрей назальный Аква Марис® Эктоин содержит комбинацию эктоина и изотонического раствора морской соли.

Эктоин является компонентом, который в природных условиях вырабатывают галофильные микроорганизмы, способные существовать в чрезвычайно неблагоприятных условиях внешней среды.

Благодаря высокой гидрофильности (средство к молекулам воды), эктоин образует с ними прочные кластеры, формируя неощутимый защитный «эктоин гидрокомплекс» на поверхности слизистой оболочки носа. Данный комплекс препятствует контакту аллергенов с клетками слизистой оболочки носа, защищая от возникновения аллергической реакции и снижая выраженность проявлений аллергического ринита. При этом аллергены фиксируются на поверхности гидрокомплекса и могут быть эффективно удалены из полости носа при промывании или высмаркивании.

Раствор натуральной морской соли, входящий в состав Аква Марис® Эктоин, способствует механическому удалению аллергенов с поверхности слизистой оболочки носа и очищает ее поверхность от осевшей уличной и домашней пыли. Микроэлементы и минералы морской соли улучшают функцию мерцательного эпителия, оказывают противовоспалительное и восстановительное действие на слизистую оболочку полости носа.

**Аква Марис® Эктоин не вызывает привыкания. Продолжительность применения не ограничена.**

#### **ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**

##### **Защита слизистой оболочки носа от воздействия:**

- пыльцы (в период сезонного цветения растений);
- бытовых аллергенов (клещи домашней пыли);
- шерсти животных;
- аллергенов тараканов и других насекомых;
- грибковых аллергенов;
- аллергенов бытовой химии, а также других инородных частиц, попадающих в полость носа при дыхании.

**Симптоматическое лечение аллергического ринита с целью уменьшения выраженности зуда, чихания, насморка, слезотечения и заложенности носа**

#### **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:**

Интраназально.

Детям с 2-х лет и взрослым по 1-2 впрыскивания в каждую ноздрю 3-4 раза в день.

В случае необходимости препарат можно использовать так часто, как это требуется для достижения желаемого эффекта.

Детям младше 10 лет применять спрей только под контролем взрослых.

#### **ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:**

Для максимального профилактического эффекта спрей назальный Аква Марис® Эктоин необходимо использовать за 10-15 минут до контакта с предполагаемым аллергеном или иным раздражителем.

Спрей назальный Аква Марис® Эктоин следует применять систематически на протяжении всего периода активного цветения и пыления растений, вызывающих аллергию.

Рекомендуется повторно использовать спрей для носа Аква Марис® Эктоин после каждого очищения носовой полости (высмаркивания или промывания).

#### **УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:**

Перед первым использованием следует снять защитный колпачок и нажать на распылитель 2-3 раза, чтобы удалить из него воздух. Не следует отрезать наконечник. Если функция спрея нарушена (например, если флакон находился в горизонтальном положении), то, удерживая флакон в вертикальном положении, необходимо нажать несколько раз на распылитель.

*По гигиеническим соображениям каждый флакон спрея назального Аква Марис® Эктоин должен использоваться только одним человеком. После каждого применения насухо вытирайте наконечник распылителя и плотно закрывайте флакон.*

#### **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Детский возраст до 2-х лет.

Не влияет на скорость реакции при управлении автотранспортом и работе с другими механизмами.

Нет противопоказаний к применению у беременных и кормящих женщин.

#### **ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:**

Не выявлены.

#### **СРОК ГОДНОСТИ:**

3 года. После вскрытия флакона спрей следует использовать в течение 6 месяцев.

Не использовать по истечении срока годности.

#### **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ:**

Эксплуатация, хранение, транспортирование осуществляются при температуре окружающей среды не выше 25°C.

Медицинское изделие должно храниться в сухом, недоступном для детей месте.

#### **УПАКОВКА:**

По 20 мл в пластиковом флаконе. По одному флакону помещают в картонную пачку вместе с инструкцией по применению.

#### **УТИЛИЗАЦИЯ:**

Спрей назальный «Аква Марис® Эктоин» не оказывает негативного воздействия на окружающую среду, поэтому специальные меры для утилизации спрея не требуются.

#### **ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:**

JADRAN – GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20,  
51000 Rijeka, Croatia (ЯДРАН - ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИЙ  
а.о., Свилно 20, 51000 Риека, Хорватия)

#### **МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА:**

JADRAN – GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, Croatia  
(ЯДРАН - ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИЙ а.о., Свилно 20, 51000 Риека, Хорватия)

**Претензии к качеству продукта следует направлять в адрес Общества с ограниченной ответственностью «ЯДРАН»:**

119330, г. Москва, Ломоносовский пр-т, д.38, оф. 30  
тел./факс (495) 970-18-82  
www.aquamaris.ru



XX ASUOXXX-V1