

# АКВА МАРИС® ПЛЮС



## Инструкция-вкладыш по применению для пациентов Спрей назальный Аква Марис® Плюс

### РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ:

№ РЗН 2021/14023 от 15.04.2021 г.

**Стерильный изотонический раствор морской воды с декспантенолом.  
Содержание NaCl не менее 9 г/л**

### СОСТАВ НА 30 МЛ:

Морская вода – 6042,0 мг  
Декспантенол – 300,0 мг  
Дигидрофосфат калия – 60,8732 мг  
Династрия фосфат додекагидрат – 5,9816 мг  
Вода очищенная – до 30 мл  
Натуральная вода Адриатического моря, входящая в состав раствора, содержит ионы Cl<sup>-</sup>, Na<sup>+</sup>, SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>, Mg<sup>2+</sup>, Ca<sup>2+</sup>, K<sup>+</sup>, HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>; Br<sup>-</sup>, а также микроэлементы, такие как: цинк, селен, йод, железо, марганец и др.  
Не содержит консервантов.

### ВНЕШНИЙ ВИД:

Бесцветный прозрачный раствор.

### НАЗНАЧЕНИЕ:

Спрей назальный Аква Марис® Плюс предназначен для нанесения на слизистую оболочку носа для увлажнения и восстановления слизистой оболочки и удаления выделений.

### ПРИМЕНЯЕТСЯ:

- для орошения и увлажнения слизистой оболочки носа;
- для удаления вирусов, бактерий и инородных частиц;
- для восстановления и заживления слизистой оболочки носа;
- для уменьшения раздражения и воспаления локальных участков слизистой оболочки.

### ОПИСАНИЕ:

Стерильный изотонический раствор морской воды с декспантенолом увлажняет слизистую оболочку носа и способствует поддержанию ее нормального физиологического состояния, способствует разжижению слизи и нормализации ее выработки в бокаловидных клетках слизистой оболочки носовой полости.

Микроэлементы воды Адриатического моря улучшают функцию мерцательного эпителия, оказывают стимулирующее, восстановительное, очищающее, противовоспалительное действие на слизистую оболочку полости носа, повышают ее устойчивость к внедрению патогенных микроорганизмов.

**Ионы кальция и магния** стимулируют движение «реснитчатых клеток» слизистой оболочки, способствующих удалению из полости носа микроорганизмов и инородных частиц, и нормализуют реологические свойства слизи (вязкость, текучесть).

**Йод, ионы натрия и хлорид-ионы** оказывают антисептический эффект, а также активизируют выработку защитной слизи.

**Ионы цинка и селена** стимулируют местный иммунитет слизистой оболочки носа и околоносовых пазух.

**Ионы кальция** обладают противоаллергическим действием.

**Карбонаты, сульфаты, хлориды** нормализуют выработку назальной слизи.

Декспантенол стимулирует процессы восстановления слизистой оболочки, оказывает регенерирующее, метаболическое и слабое противовоспалительное действие.  
Спрей назальный Аква Марис® Плюс способствует удалению вирусов, бактерий, аллергенов и инородных частиц со слизистой оболочки носа, ее восстановлению и заживлению, а также уменьшению местного воспалительного процесса.

### ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- профилактика острых респираторных инфекций (ОРВИ);
- профилактика ринита;
- сухость слизистой оболочки полости носа;

- подготовка слизистой оболочки к применению назальных препаратов;
- сохранение физиологических характеристик слизистой оболочки полости носа в измененных микроклиматических условиях у лиц, живущих и работающих в помещениях с кондиционированным воздухом и/или центральным отоплением; у людей, носоглотка которых постоянно подвергается вредным воздействиям (курильщики, водители автотранспорта, люди, работающие в горячих и запыленных цехах, а также находящиеся в регионах с суровыми климатическими условиями).

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для профилактики ОРВИ и ринита и ежедневной гигиены носовой полости – детям с 1 года и взрослым по 1-2 впрыскиванию несколько раз в день, при необходимости возможно более частое применение.

Для устранения сухости и раздражения в носовой полости – детям с 1 года и взрослым по 3-4 впрыскивания несколько раз в день, при необходимости возможно более частое применение. Длительность применения не ограничена.

### УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Перед первым использованием следует снять защитную крышку и нажать на распылитель 2-3 раза для того, чтобы выпустить воздух.

Спрей назальный Аква Марис® Плюс совместим со всеми средствами, используемыми для лечения насморка.

### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Повышенная чувствительность к компонентам раствора.

### СПОСОБНОСТЬ ВЛИЯТЬ НА СКОРОСТЬ РЕАКЦИИ ПРИ УПРАВЛЕНИИ АВТОТРАНСПОРТОМ ИЛИ РАБОТЕ С ДРУГИМИ МЕХАНИЗМАМИ:

Не влияет на скорость реакции при управлении автотранспортом и работе с другими механизмами.

### ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И В ПЕРИОД ЛАКТАЦИИ:

Может применяться при беременности и лактации.

### ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

Не выявлены.

### СРОК ГОДНОСТИ:

2 года. Не использовать по истечении срока годности.

### ФОРМА ВЫПУСКА И УПАКОВКА:

По 30 мл раствора в стеклянном флаконе темного цвета (200 доз), снабженном распылительным устройством и защитной крышкой. Один флакон вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ (ЭКСПЛУАТАЦИИ):

Хранить в недоступном для детей месте при температуре + 25±10° С, влажности 45-80%, давлении 84-106.7 кПа.

### УТИЛИЗАЦИЯ:

Спрей назальный Аква Марис® Плюс не оказывает негативного воздействия на окружающую среду, поэтому специальные меры для утилизации раствора не требуются.

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:


JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, Croatia  
(ЯДРАН-ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИЙ а.о., Свилно 20, 51000 Риека, Хорватия).

### МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА:

JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, Croatia  
(ЯДРАН-ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИЙ а.о., Свилно 20, 51000 Риека, Хорватия).

### ПРЕТЕНЗИИ К КАЧЕСТВУ ПРОДУКТА СЛЕДУЕТ НАПРАВЛЯТЬ В АДРЕС ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЯДРАН»:

119330, г. Москва, Ломоносовский пр-т, д.38, офис VII, тел./факс: +7(499)143-33-71.  
www.aquamaris.ru

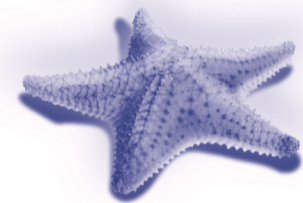

RU 130002729/01