



ИНСТРУКЦИЯ по применению

Устройство полимерное с твердым пористым стержнем для хранения и нанесения спиртового раствора бриллиантового зеленого «Леккер-Бз»-2,3 (тип 2,3)
ТУ 9398-001-54291689-2002

1. Назначение

Устройство предназначено обработки кожных покровов с целью профилактики раневых инфекций.

Бриллиантовый зеленый раствор спиртовой обладает антисептическими, дезинфицирующими и антибактериальными свойствами. Без рецепта врача.

Рекомендации по применению:

- ссадины
- порезы
- свежие послеоперационные и посттравматические рубцы
- мейбомит
- блефарит
- пиодермия
- ветрянка

2. Способ применения

Наружно для индивидуального применения. Поврежденные участки кожи обрабатывают раствором, покрывая непосредственно поврежденную поверхность.

- Открыть колпачок;
- При помощи стержня обработать края раны или участок кожного покрова;
- Закрыть колпачок.

3. Меры предосторожности.

Противопоказано при индивидуальной непереносимости раствора бриллиантового зеленого 1%. При обработке ран, ссадин возможно кратковременное ощущение жжения, которое проходит самостоятельно.

4. Правила хранения и использования

Хранить плотно закрытым, в недоступном для детей месте при температуре от 5⁰ до 25⁰ С.

Срок годности 1,5 года (18 месяцев)



ИНСТРУКЦИЯ по применению

Устройство полимерное с твердым пористым стержнем для хранения и нанесения спиртового раствора йода «Леккер-Йод»-2,3 (тип 2,3)
ТУ 9398-001-54291689-2002

1. Назначение

Устройство предназначено обработки кожных покровов.

Йод раствор спиртовой обладает антисептическим, подсушивающим свойствами и оказывает противовирусный, противомикробный, противогрибковый эффект. Без рецепта врача.

Рекомендации по применению:

- инфекционно-воспалительные заболевания кожи
- ссадины, порезы
- микротравмы

2. Способ применения

Наружно для индивидуального применения. Поврежденные участки кожи обрабатывают раствором по мере необходимости.

- Открыть колпачок;
- При помощи стержня обработать края раны или участок кожного покрова;
- Закрыть колпачок.

3. Меры предосторожности.

Противопоказано при индивидуальной непереносимости раствора йода спиртового 5%. При обработке ран, ссадин возможно кратковременное ощущение жжения, которое проходит самостоятельно.

4. Правила хранения и использования

Хранить плотно закрытым, в недоступном для детей месте при температуре от 5⁰ до 25⁰ С.

Срок годности 1,5 года (18 месяцев)